



LVS抽氣式護木

迅速、平整、完全包覆、無須鋪平作業

一、品牌：lifewatch

二、品名：抽氣式骨折夾板

三、材質：乙稀基尼龍層布材質

四、產地：台灣

五、產品介紹：

1. 骨折板之抽吸接頭為具氣密環之快速接頭，有快速彈簧卡榫，確保聯結時不會脫落，可快速連接抽氣及充氣

2. 材質柔軟、無外傷之困擾

3. 抽真空成型後，不壓迫血液的正常循環，硬度可達至少7日以上

4. X光線可完全透視，無金屬物影像

5. 具防水尼龍製好清洗之攜行袋

六、尺寸、內容物



▲ 收納包



▲ 三片尼龍夾板

尼龍夾板尺寸			
	Length (cm)	width (cm)	固定部位
Small	50	33	手肘、腳踝
Medium	50	70	全臂、全腳
Large	75	100	頸部、軀幹



鋁合金手動抽氣式幫浦、塑膠連接管 ▲



八、使用說明

1. 視需要決定適當的固定板。
2. 打開固定板上的黏扣帶。
3. 展開固定板，無印廠牌名面朝上平置，撫平其內含的介質。
注意：此步驟宜由兩位急救員來完成，當一位在使用操作固定板時，另一位則適當照撫受傷的部位。但傷口可見或骨頭突出，宜先作傷口處理，蓋上無菌敷料，以防傷口感染惡化或刺破固定板。
4. 緩慢將固定板包覆骨折處，以提供骨折處其上、下之支撐及固定。
5. 扣上黏扣帶。
6. 打開固定板上的接頭並接上抽吸唧筒。
7. 開始壓縮抽吸唧筒以抽吸出空氣直到固定板成僵硬狀態。
8. 分離抽吸唧筒與固定板即可。
9. 反之，壓下開固定板上的接頭固定板會自行吸氣，當固定板變軟時，解開黏扣帶，小心的卸除固定板。

