

生產模擬器 操作說明



功能：

- 包括帶有胎兒和胎盤的的骨盆模型，讓學員能夠真實地練習緊急分娩的多種技術和程序。
 - 包括帶夾子的一次性臍帶、額外的外陰部、懷孕的腹部覆蓋層、透明腹部覆蓋物、模擬血粉和輕質軟手提袋。
 - 懷孕的腹部覆蓋層包含一個囊袋，其中有一個永久放置的胎兒，可以進行觸診。液體混合物需要加水來配製。建議透過下側的閥門將 4公升水注入孕婦的腹部。水會與囊中已有的粉末狀物質混合，以模擬懷孕腹部的感覺。
 - 隨附的一個透明充氣袋，放置在懷孕的腹部覆蓋層下方，該覆蓋層通過透明充氣帶充氣的大小，提供所需的腹部硬度。充氣時，請將透明袋放置在腔體的上側（腰部），然後將懷孕的腹部覆蓋層放置在人體模型上。將充氣球末端的管子連接到透明袋上的閥門，然後透過充氣球來充氣透明袋。當達到所需的硬度時，關閉透明袋上的閥門並取下充氣球以防止漏氣。這將使孕婦腹部的外觀和感覺更加逼真。
 - 其中含有血粉和增稠粉，可產生可通過產道的液體。如果您選擇不使用液體進行模擬分娩，則使用隨附的爽身粉以清潔產道內部和胎兒外部。
- *建議人造血液不要與懷孕的腹部覆蓋層一起使用，以防止含有胎兒和模擬羊水的尼龍塗層內袋染色。**
- 該模型包括一次性臍帶（可以綁紮和剪斷）、一次性臍帶夾和逼真的彩色肝臟狀胎盤。新生兒有一個「扣環」肚臍，臍帶的一端可以連接到新生兒，另一端可以連接到胎盤。

為新生兒充氣：

1. 將充氣球上的管子連接新生兒模型左腳上的金屬閥。
2. 轉動打開。
3. 按壓充氣球直至達到所需的硬度。
4. 拆下充氣球。



清潔和維護：

1. 所有零件都可用溫水和溫和的肥皂清洗。
2. 每次使用後清潔骨盆模型、新生兒模型及內產道。

***大多數衣物上的模擬血液經過充分洗滌後即可去除，但可能會留下永久性污漬。**

