



德康醫療

MedOne Medical

DeVilbiss Suction unit

抽痰機
(7305T)



中文操作手冊


2014/05 版本



Devilbiss 抽痰機操作說明書

機器部位說明

1. 壓力錶
2. 抽吸力調整鈕
3. 直流電接頭
4. 電源開關
5. 連接管
6. 抽痰瓶
7. 抽痰瓶蓋
8. 過濾器

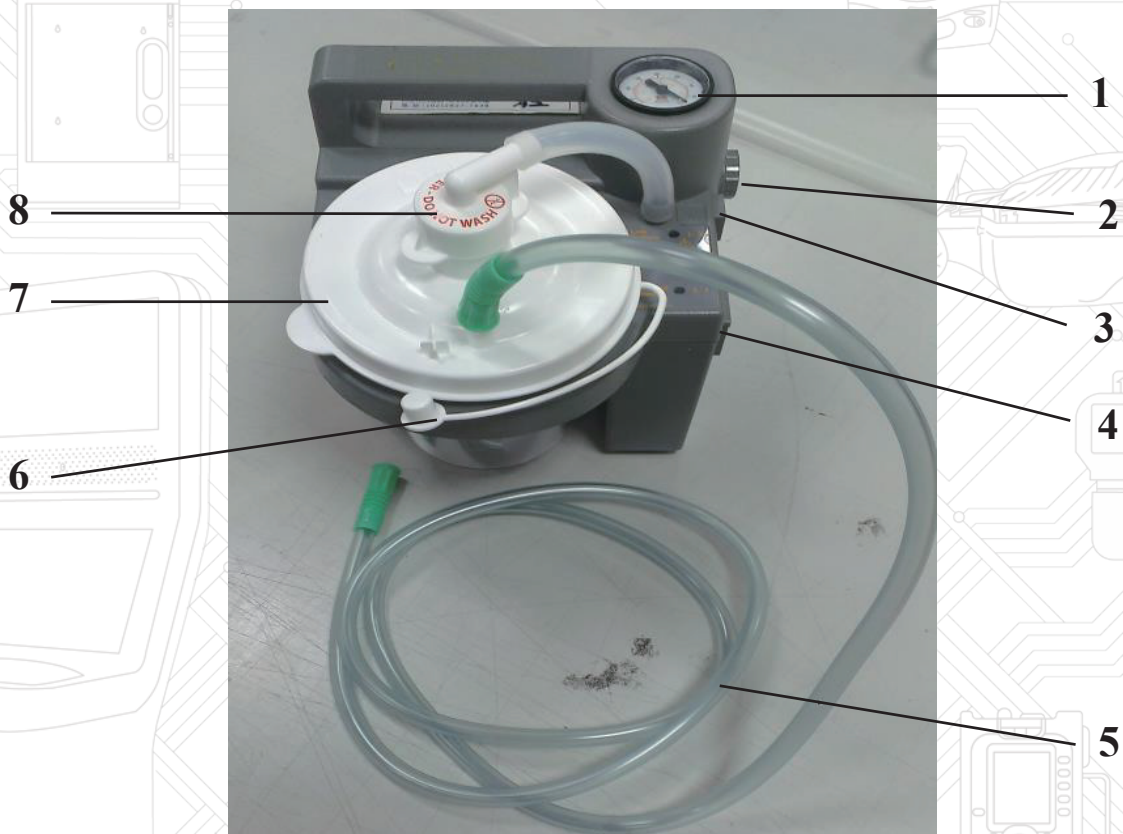



面板指示燈



1. L1 External Power : 綠燈亮，表示使用外接電源
2. L2 Charging : 黃燈亮，表示內電池正在充電，充滿時黃燈熄滅。
3. L3 Low Battery : 紅燈亮，表示內電池電力不足，需充電。
充電時間大約10-17小時，充完電可連續空轉約1小時。

註：本抽痰機分“有充電電池”及“無充電電池”兩型，有充電電池之抽痰機面板上才有L2、L3。

操作說明

1. 將變壓器一端插入抽痰機直流電接頭，另一端插入電源插座。

直流電接頭



插入電源插座




或使用車上電源線（選購配備），可在汽車內操作。



選配零件：車充線

2. 若抽痰機內有充電電池，可直接使用。
3. 打開電源開關。

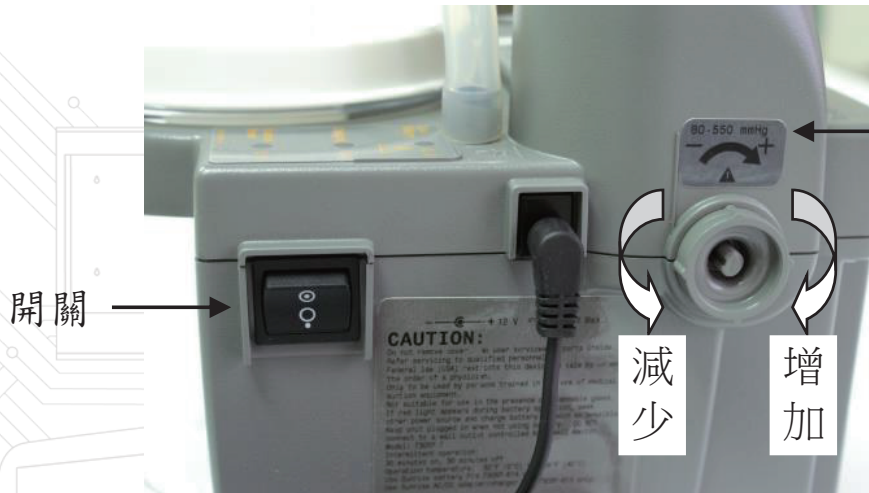

4. 使用抽吸力調整鈕調整壓力。（順時針為增加抽吸力，逆時針為減少抽吸力）。

可將抽痰瓶蓋上病人抽吸端阻塞，由壓力錶上讀取壓力。


清潔

1. 請勿以水清洗機器本體。
2. 拆下抽痰瓶、連接管，以清水沖洗後，用一份白醋(或醫師指示消毒液)三份清水浸泡，再予以清洗晾乾。



注意事項

1. 抽痰瓶內液體高於安全線時，抽痰瓶蓋上防溢流裝置將自動阻塞，請排空抽痰瓶內液體。若繼續使用，可能造成液體流入抽痰機而故障。

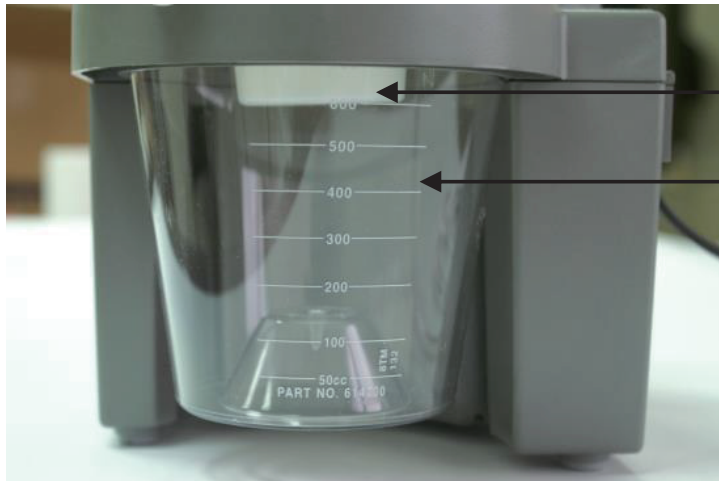

防溢流裝置

在 400~500CC 之間
注意就要倒光痰液

2. 當紅燈亮時，表示內電池電力不足，若繼續使用，將縮短電池壽命。



L3 紅燈亮代表電力不足
請充電或須更換內電池



3. 過濾網每兩個月或被污染時請更換。



過濾網



過濾網

故障排除

1. 吸力不足。

A. 在插電交流電 110V 狀況下：

- (1) 注意設定之壓力，將過濾網拔除，用手壓住抽吸孔，壓力應當馬上爬升至設定之最高壓。若無，內部馬達或單向閥可能已故障，請通知廠商維修之。若有，即機器主體正常。



(2) 接回過濾網，用手指阻塞抽痰瓶口，因馬達抽吸，瓶中空氣壓力會慢慢上升至設定壓力。

若無 (a) 抽痰瓶可能龜裂，請更換新瓶。

(b) 可能瓶蓋沒蓋好漏氣，請重新蓋好瓶蓋。

若有，即抽痰瓶正常，可能病人痰太濃黏，須注意氣切病人濕度問題，詳細醫療處理方式，請詢問醫師或護理人員。



B 在使用內電池狀況下：

(1) 發現馬達運轉無力且L3內電池紅燈閃爍，可能內電池無電，請使用插電110V交流電，或在車上使用車充線，並注意內電池是否已使用年代久遠老化須更換內電池。

(2) 測量壓力方式同上

若壓力正常，仍覺痰不易抽出，須注意氣切病人濕度問題。



德康醫療
MedOne Medical

☎ 德康醫療器材事業有限公司

✉ service@theone.com.tw

☎ 02-2258-2288

📍 220新北市板橋區合宜路199號1樓