



產品規格書

| | |
|----|---|
| 型號 | 128-01050 (淺); 128-03050 (深色) |
| 中文 | 小少年 QCPR |
| 英文 | Little Junior QCPR |
| 照片 |  <p style="text-align: center;">QCPR Training APP</p>  <p style="text-align: center;">SkillGuide</p>  |
| 品牌 | Laerdal |
| 用途 | 模擬 4 歲的兒童，配備逼真的臉部、胸部與氣道解剖構造，可連結 Laerdal 高品質 CPR 回饋裝置或 APP，適合用於兒童基本生命復甦與急救訓練。 |
| 特色 | <p>[1]. 提供 CPR 復甦技巧練習</p> <p>[2]. 可兼容 QCPR APP 回饋，回饋參數符合 AHA 復甦準則</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. iOS 或 Android 手機或平板皆可免費下載使用 2. 藍芽連接，一次可連接 6 具模型 3. 提供 CPR 模式或純壓胸模式 4. 即時回饋模式: 採用容易了解的動態圖示與燈號，回饋以下訊息 <ol style="list-style-type: none"> a. 壓胸次數 |



MED.ONE

德康醫療器材事業有限公司

| | |
|--------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b. 下壓深度是否足夠 c. 回彈是否足夠 d. 壓胸速率(正確、過快或過慢) e. 通氣次數、通氣有無、CPR 時間。 <p>5. 評估報告模式:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 總成績: CPR 整體成績、以圖式與燈號顯示 CPR 過程主要缺點，例如: 壓胸深度不夠、回彈不夠、通氣過少、通氣過多、通氣正確等指示。 b. 計算連續壓胸比例(CCF)、按壓通氣比、CPR 總時間 c. 按壓成績: 按壓總成績、按壓次數、回彈正確率、下壓深度正確率、速度正確率、平均按壓速率(次數/min) d. 通氣成績: 通器總成績、通氣次數 <p>6. 救護車競賽模式: 以 CPR 正確率作為救護車是否可快速達到終點為依據，提供訓練過程的趣味性</p> <p>7. 可將訓練結果紀錄於手機或平板</p> <p>[3]. 可兼容 SkillGuide 電子顯示儀 (型號: 170-30050)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 操作簡單，可提供 CPR 復甦技巧練習 2. 具備即時回饋模式、不回饋模式與評估報告(Debriefing)模式 3. 即時回饋模式: 採用容易了解的圖示燈號，並且符合 AHA 準則。回饋訊息包含: 壓胸次數、下壓是否足夠、回彈是否足夠、壓胸速率是否正確、壓胸速率過快或過慢、錯誤的手部位置(如有)、通氣次數、通氣有無、CPR 時間。 4. 不回饋模式: 不顯示任何回饋訊息，避免學員對回饋訊息的依賴，適用於學員考試評核。 5. 評估報告模式: 可顯示按壓得分、通氣得分、連續壓胸比例(CCF)，CPR 總時間。指示燈會閃爍，指示 CPR 過程裡與深度、按壓速率、回彈釋放有關的錯誤。螢幕另以短動畫顯示壓胸位置是否正確、通氣過少、通氣過多、通氣正確等指示。 |
| <p>產品內容物</p> | <ul style="list-style-type: none"> [1].一個模擬假人 [2].二組氣道(一組已裝在模擬人中) [3].6 包假人擦拭布 [4].小少年衣服一件 [5].一個訓練軟墊與攜帶兩用之提袋/ |

Prepare: 2021/08/10



德康醫療
MedOne Medical

德康醫療器材事業有限公司
 service@theone.com.tw
 02-2258-2288
 220 新北市板橋區合宜路199號1樓