



prismaVENT 30-C

prismaVENT 40

中文使用手冊（居家版）



德康醫療

MedOne Medical

☎ 德康醫療器材事業有限公司

✉ service@theone.com.tw

☎ 02-2258-2288

📍 220 新北市板橋區雙十路二段79號13樓之2

目錄

外觀介紹	3
前方顯示面板	4
開機/ 開始通氣	5
暫停/關機	5
監測畫面	6
更改參數設定	6
常見問題警報	8


外觀介紹



前方顯示面板



開機 / 開始通氣

長按開關  鍵，直到出現以下畫面，即為開機

再按一次  即可開始通氣




暫停 / 關機

長按開關  鍵，會出現以下畫面，直至橘色格子跑滿即可暫停通氣



在暫停通氣後， 會出現以下畫面，直至橘色格子跑滿即可關機

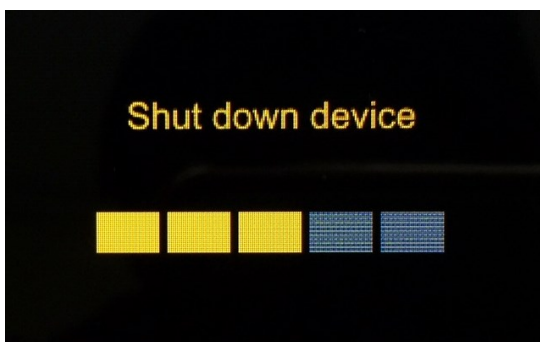

監測畫面




首頁畫面
壓力柱. 漏氣柱
測量參數



畫面 1
時間
吸吐氣指示





畫面 2
壓力柱. 漏氣柱
吸吐氣指示

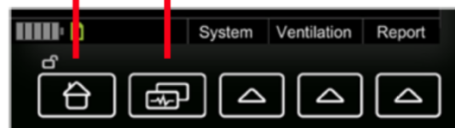


更改參數設定


分為三大頁面，System . Ventilation . Report，說明如下：
利用旋鈕更改與確定參數

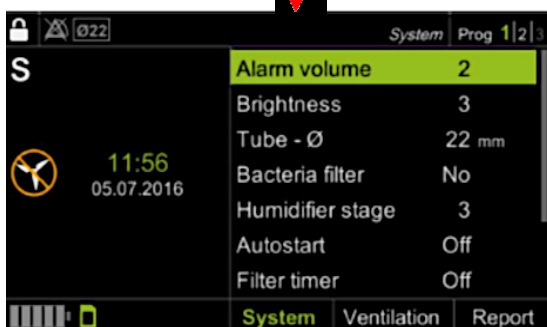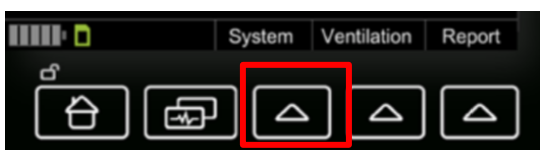

System	
Alarm volume	警報音量
Brightness	亮度
Tube	管路直徑
Bacteria filter	過濾器
Humidifier stage	濕度等級
Autostart	智慧型啟動
Filter timer	過濾器計時器
Date/time	日期/時間
Device Status	機器狀態

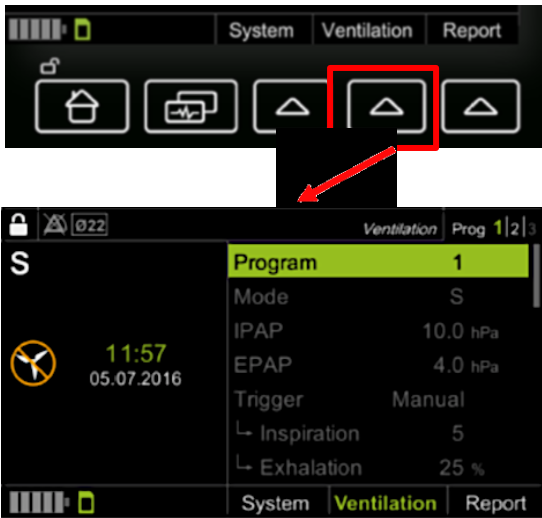

Ventilation	
Program	預設模式 (可切換)

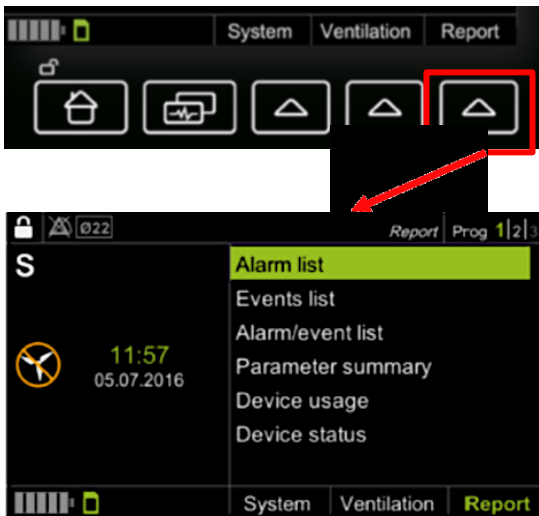

Report	
Alarm list	警報清單
Event list	事件清單
Alarm/event list	警報與事件清單
Parameter summary	參數總結
Device usage	機器使用時數
Device status	機器狀態

常見問題警報

警報訊息	原因	處置
Apnea	在設定的時間內未偵測到自主呼吸	檢查設定
Pressure high	超過設定的壓力	檢查設定
Pressure low	低於最低治療壓力	清潔或更換過濾器
	患者/呼吸器的介面漏氣	重新調整或檢查介面
	設定不正確	檢查設定
Frequency high	呼吸次數超過警報設定	檢查設定
Frequency low	呼吸次數低於警報設定	檢查設定
Minute volume high	每分鐘換氣量超過警報設定	檢查設定
Minute volume low	每分鐘換氣量低於警報設定	檢查設定
Tidal volume high	管路漏氣	尋找漏氣點或更換管路
	患者呼吸正常	檢查設定
Tidal volume low	過濾器太髒	清潔或更換過濾器
	患者/呼吸器的介面漏氣	重新調整或檢查介面
	設定不正確	檢查設定
Leakage high	漏氣	檢查管路與介面



德康醫療
MedOne Medical

☎ 德康醫療器材事業有限公司

✉ service@theone.com.tw

☎ 02-2258-2288

📍 220 新北市板橋區雙十路二段79號13樓之2