

MAC600心電圖機中文操作指南



德康醫療
MedOne Medical


☎ 德康醫療器材事業有限公司
✉ service@theone.com.tw
☎ 02-2258-2288
📍 220新北市板橋區合宜路199號1樓



一、外觀簡介




二、按鍵功能

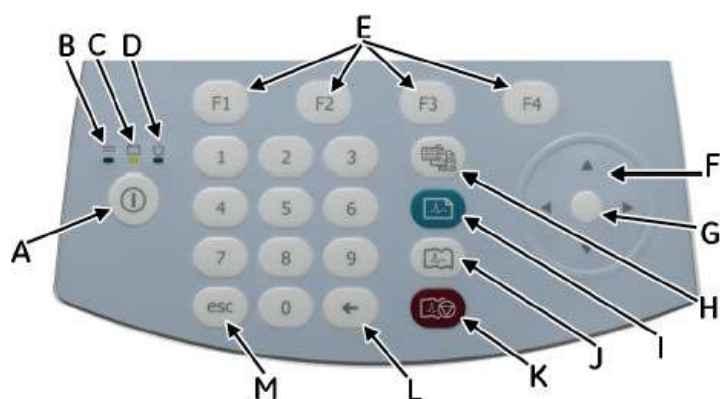

- | | |
|--------------|-----------------|
| A. 開關切換鍵 | H. Lead 顯示切換鍵 |
| B. 電源指示燈 | I. ECG 擷取鍵 |
| C. 電池指示燈 | J. 連續列印ECG鍵 |
| D. 開關指示燈 | K. 停止列印鍵 |
| E. 功能選項鍵 | L. 倒退刪除鍵 |
| F. 游標移動功能鍵 | M. 按下esc鍵可回到上一頁 |
| G. Enter 確認鍵 | |

三、畫面顯示功能

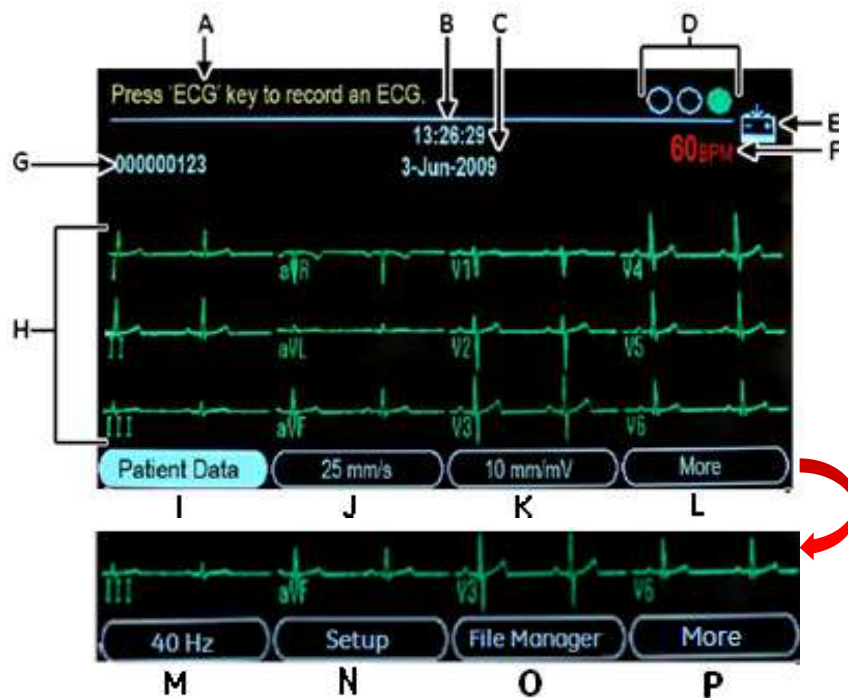


- A. 操作步驟提示
- B. 時間顯示
- C. 日期顯示
- D. ECG訊號品質指示燈
 - 紅- 品質較差
 - 黃- 品質普通
 - 綠- 品質良好
- E. 電池電量顯示
- F. HR顯示
- G. 病歷號顯示
- H. ECG顯示區
- I. 病患基本資料輸入選項: 病歷號/生日/性別
- J. ECG速度: 25mm/s(標準)、50mm/s、5mm/s、12.5mm/s
- K. ECG大小: 2.5mm/mv、5mm/mv、10mm/mv(標準)、20mm/mv
- L. 進入下一頁功能
- M. 雜訊濾波: 40Hz(標準)、20Hz、100Hz、150 Hz
- N. Setup 功能設定鍵
- O. File Manager 檔案管理員: 可儲存200筆ECG資料
- P. 返回主畫面

四、紙本放置方法



1. 向左方施力打開印表閘門。
2. 依照(圖二)箭頭將紙本放入，並拉出第一張紙。
3. 關上閘門即完成紙本放置。

五、ECG Lead 貼放位置

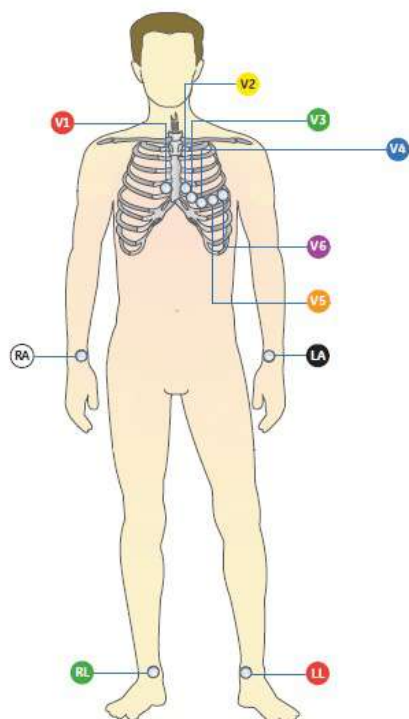

Lead	Electro code Placement
V1	胸骨右緣第四肋間
V2	胸骨左緣第四肋間
V3	V ₂ 導聯和V ₄ 導聯之間
V4	左鎖骨中線 第五肋間
V5	左腋前線 第五肋間
V6	左腋中線 第五肋間
RA	右側手腕
RL	右側腳踝
LA	左側手腕
LL	左側腳踝

六、Resting ECG 操作步驟



1. 開啟Power  。
2. 準備病患，放置電極片與 Lead wires 。
3. 按下  Patient Data輸入病患資料，輸入完畢按下 Enter鍵確認。
4. 待ECG訊號穩定按下  ECG擷取鍵凍結畫面。
5. 再次按下  Continue按鍵即可列印報告。
6. 如需重新擷取ECG訊號可按下  Cancel 重新分析。

七、File Manager 資料庫

■內部記憶體可儲存200筆ECG，ECG儲存於系統File Manager中。

1. 選擇  **More**
2. 選擇  **File Manager** 進入 < 資料管理員 >
3. 選擇  **Select** 或  **Select ALL**
4. 選擇  **More**
5. 選擇  **Delete** 刪除記憶體中資料輸入密碼 **1111** 進行刪除

